

## Armbåge

# Actimove® EpiMotion



Mätpunkt: 12 cm under armvecket

art.nr.	stl.	antal/fp
73477-01	XXS 17–19 cm	1
73477-02	XS 19–21 cm	1
73477-03	S 21–23 cm	1
73477-04	M 23–25 cm	1
73477-05	L 25–27 cm	1
73477-06	XL 27–29 cm	1
73477-07	XXL 29–31 cm	1

Actimove® EpiMotion är ett armbågsstöd som stickats med hjälp av 3Dteknik för att uppnå optimerad kompression och stabilitet. Materialet är gjort på ett mjukt och latexfritt garn som håller hög kvalitet och är bekvämt att bära. Armbågsstödet har två anatomiskt formade pelotter som varsamt masserar armbågen och dämpar smärtan.

Actimove® EpiMotion har särskilt designade uppslag med halkfri struktur, vilket håller armbågsstödet på plats vid rörelse.

### Indikationer

- Tennis- eller golfarmbåge (epikondylit)
- Degenerativa förändringar i armbågen (osteoartrit)

- Ledinflammation (artrit)
- Postoperative eller posttraumatiska besvär

Actimove EpiMotion är enkel att placera korrekt tack vare en tydlig markering för armbågsknölen.

Ortosen förbättrar stabiliteten och ger maximal säkerhet när armbågen är i rörelse.

### **Kontraindikationer**

Använd ej Actimove® EpiMotion om du lider av nedsatt lymfdränage eller cirkulationsrubbing, särskilt i underarm, hand och fingrar.

### **Rengöring och skötsel**

Actimove® EpiMotion kan maskin- eller handtvättas (skontvätt vid 30 °C/86 °F). För att bevara form och medicinska egenskaper bör Actimove® EpiMotion ej blekas, kemtvättas, tumlas eller strykas.

Använd helst ett mildt tvättmedel och låt Actimove® EpiMotion torka helt innan användning.

### **Material**

80% Polyamide

20% Elastane