

Handled

# Actimove® ManuMotion



Mätpunkt: omkrets vid handleden

art.nr.	stl.	längd	antal/fp
73497-02	XS Höger	14– 15 cm	1
73497-32	XS Vänster	14– 15 cm	1
73497-03	S Höger	15–16 cm	1
73497-33	S Vänster	15–16 cm	1
73497-04	M Höger	16–17 cm	1
73497-34	M Vänster	16–17 cm	1
73497-05	L Höger	17–18 cm	1
73497-35	L Vänster	17–18 cm	1
73497-06	XL Höger	18–19 cm	1
73497-36	XL Vänster	18–19 cm	1
73497-07	XXL Höger	19–20 cm	1
73497-37	XXL Vänster	19–20 cm	1

Actimove® ManuMotion är ett stabiliserande handledsskydd som ger anatomiskt korrekt kompression. Det latexfria materialet gör att handledsskyddet andas, samtidigt som den avancerade vävstrukturen gör den bekväm att använda. Tack vare en tryckdyna får handens ovansida en regelbunden massageeffekt som reducerar ödem och svullnader. På handledsskyddets insida finns en anatomiskt formad skena som stabiliserar handleden i en funktionellt korrekt position, vilket lindrar

smärta. Actimove® ManuMotion har en avtagbar och oelastisk handledsrem som ger handleden optimal, individuell stabilisering.

### **Indikationer**

- Artros och artrit
- Postoperativa och posttraumatiska besvär
- Reumatisk värk
- Vätskebildning och svullnad i leden

Den unika sticktekniken ger ett material som främjar rörelse och aktivitet genom att kombinera maximal stabilitet med elasticitet.

### **Kontraindikationer**

Använd inte Actimove® ManuMotion om du har akuta frakturer, nedsatt lymfflöde eller cirkulationsrubbingar, särskilt i händer och fingrar.

### **Rengöring och skötsel**

Actimove® ManuMotion kan maskin- eller handtvättas (skontvätt vid 30 °C/86 °F). För att bevara form och medicinska egenskaper bör Actimove® ManuMotion ej blekas, kemtvättas, tumlas eller strykas. Använd helst ett mildt tvättmedel och låt Actimove® ManuMotion torka helt innan användning. Observera: Avlägsna stödet och fäst handledsremmen före tvätt.

### **Material**

80% Polyamide

20% Elastane