

Actimove® Lumbal

Ryggstöd



- **Bekväm**
- **Lätthanterlig**
- **Tvättbar**

Actimove® Lumbal

Ryggstöd

Actimove® Lumbal är ett bekvämt ryggstöd för ländryggen.

Indikationer

För ländstöd.


Värk i ländryggraden och vid sträckningar i nedra delen av ryggen.

Användning


1. Öppna upp stödet och lossa först på kardborrbanden på de laterala sidorna.
2. Centrera stödet bakom nedre delen av ryggen och kardborrfästet åt höger och vänt mot kroppen. Lägg stödet utmed sidorna och drag framåt.
3. Med bibehållen lätt dragning lägg den vänstra änden på buken först. Håll kvar detta läge. Lägg sedan den andra delen framåt och fäst kardborrbanden
4. Greppa de elastiska sidragen, drag dem framåt och fäst dem, först den vänstra sidan sedan den högra sidan.

Skötselråd

Fäst kardborrebanden. Maskintvätt 30°C (skontvätt) eller handtvätt i ljummet vatten med mild tvål. Låt lufttorka i rumstemperatur. Se till att stödet är helt torr innan återanvändning.

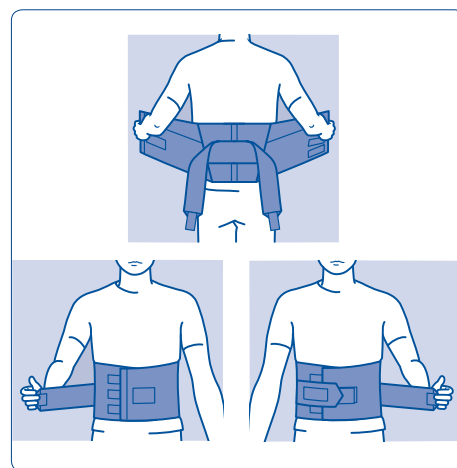

Beställningsinformation

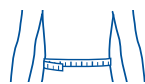

Art.nr	Storlek	Måtttagning	Antal/förp
72819-04	Small	64-77 cm	1 st
72819-05	Medium	77-91 cm	1 st
72819-06	Large	91-107 cm	1 st
72819-07	X-Large	107-122 cm	1 st
72819-85	XX-Large	122-135 cm	1 st
72819-86	XXX-Large	135-150 cm	1 st

