

Physiopack®

Kyl/Värme Gel kompress



För tillfällig nedkylning av
Idrottsskada
vrickningar, stukningar
Minskar svullnaden
Minskar smärtan

Physiopack® är en grön gel påse som är praktisk och återanvändbar förpackning avsett för värme- eller kylbehandling som är lätt att ha till hands. Den är lämplig att använda på alla delar av kroppen och med ger rörlighet för patienten.

FÖRDELAR

Kylbehandling

Ökar kärlsammandragningen, minskar smärtan och svullnaden.

Värmebehandling

Ökar blodcirkulationen och elasticiteten i fibrerna samt minskar smärtan.

Återanvändbar

Bekvämt att bära och fixeras på avsett område med en kohesiv binda.

BRUKSANVISNING

Förberedelser vid värmeterapi

Kokande vatten: lägg påsen i uppkokat vatten i 7 min.

Mikrovågsugn: 20 sekunder Max 800 w.

Förberedelser vid kylterapi

Frys vid -25°C: Produkten uppnår adekvat temperatur efter 2 tim. Anpassa nedkylningstiden efter kylskåpets eller frysens temperatur.

Använd alltid skyddsduk mellan **Physiopack®** och huden för att undvika risk för brännskada
 kylpåse är klar för omgående användning för att ge tillfällig behandling av en muskelskada, hematom, vrickning och stukning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Endast för utvärtes bruk

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
72075-01	7 cm x 9 cm	48	48	Grön gel
72075-04	19 cm x 30 cm	6	6	Grön gel
72075-02	13 cm x 30 cm	12	12	Grön gel

® Reg Trade Mark