

## **Seal Tight®**

Duschskydd



- **Flergångs-  
användning**
- **Skyddande för  
lindade ben**

# Seal Tight®

## Duschskydd

### Material

Seal-Tight® duschstrumpa är tillverkad av kraftig, transparent vinyl. Strumpan är fäst i en plastring av hållfast polypropylen. Inuti ringen sitter en packning av syntetisk gummi med ett hål i mitten. Gummipackningen sluter tätt kring den arm eller det ben som ska skyddas från vatten.

### Bruksanvisning

1. Lyft med hjälp av tummar/fingerar innanför gummipackningen duschstrumpan upp över gipset stegvis.
2. Lyft upp strumpan så långt som möjligt. För därefter tillbaka plastringen något, så att gummiringens innerkant pekar uppåt. V.g. se bild.
3. **OBS! Tänk på att våt plast kan vara halkig i badkar och på golv!** Använd gärna halkskydd.
4. Duscha av strumpan efter användning och låt dropptorka.



## Beställningsinformation

Art.nr	Storlek	Längd	Antal/förp
<b>Vuxen</b>			
72045-09	Underarm	56 cm	1 st
72045-07	Hel arm	99 cm	1 st
72045-10	Underben	59 cm	1 st
72045-08	Hel ben	107 cm	1 st
72045-11	Föt	28 cm	1 st
<b>Barn</b>			
72045-01	Arm	46 cm	1 st
72045-02	Arm	71 cm	1 st
72045-04	Ben	46 cm	1 st
72045-05	Ben	79 cm	1 st

