

Actimove® AchilloMotion

Stöd för hälsena



- Smal, anatomisk form
- Komfortzone över vristen
- Hälkilar

Actimove® AchilloMotion

Stöd för hälsena

Actimove® AchilloMotion är ett anatomiskt utformat stöd i vävt material som utvecklats speciellt för att stabilisera hälsenan och minska obehag och smärta i detta område.

Kompression

I stödet kombineras en tredimensionell vävningsteknik med högkvalitativa trådar som erbjuder en cirkulär kompression, hög andningsförmåga och stabilitet. Komfortzone över vristen för optimal passform och komfort.

Massage

De specialdesignade kanterna av halkfri vävstruktur trycker inte mot huden vilket motverkar tryckpunkter. Två sömlösa pelletter ger en masserande effekt på de mjuka vävnaderna på båda sidorna av hälsenan vilket hjälper till att öka blodcirkulationen och minska ödem och svullnader.

Hälkilar

För att ytterligare avlasta hälsenan under behandlingens akuta fas levereras Actimove® AchilloMotion med två Technogel®-hälkilar.



Indikationer


Vid akut och kronisk inflammation i hälsenan, akiljestendinopati, akillesbursit och Haglunds sjukdom. Stödet rekommenderas även för behandling av degenerativa förändringar i hälsenan eller vid postoperativa eller posttraumatiska irritationer (t.ex. efter operation av hälsenan).

Skötselråd


Kan hand- eller maskintvättas (30 °C). Stödet bör torka helt innan användning. Hälkilarna kan enkelt rengöras under kallt rinnande vatten. När kilarna inte används ska skyddsfilmerna vara på för att skydda den självhäftande sidan mot smuts.

Bruksanvisning

1. Vänd den övre delen ut och in tills du kan greppa tag i de integrerade pelletterna med tummen (bild 1).
2. Trä stödet på foten och upp runt hälen. Pelletterna ska placeras på båda sidorna av hälsenan (bild 2).
3. Vänd tillbaka den övre delen (bild 3).
4. Justera passformen på stödet efter behov (bild 4).
5. Sätt in de separata hälkilarna i dina skor om du önskar. Detta gör du genom att avlägsna skyddsfilmerna och placera kilarna med den självhäftande sidan nedåt i skorna. Använd alltid båda kilarna för att benen ska ha samma längd.

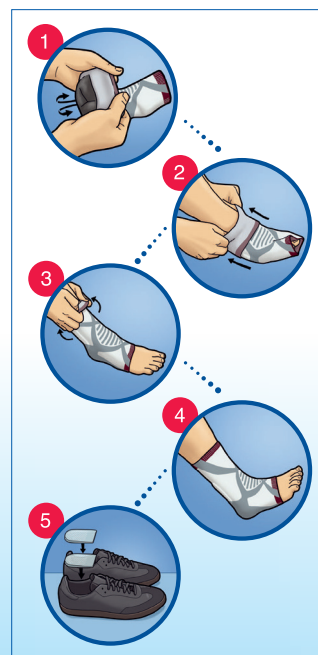

Beställningsinformation

	Storlek	Art.nr	Art.nr	Antal/fp
19-21 cm	S	76231-07	76231-01	1
21-23 cm	M	76231-08	76231-02	1
23-25 cm	L	76231-09	76231-03	1
25-27 cm	XL	76231-10	76231-04	1
27-29 cm	XXL	76231-11	76231-05	1

